

CliniCare 100 HF

Colchón reactivo altamente eficaz



Paciente

- Tratamiento según las necesidades del paciente
- Gestión del microclima
- Reposo cómodo



Personal

- Ajustes y usos variables
- Óptimo control de las infecciones



Administración


- Alto estándar a un precio accesible
- Prevención eficaz de úlceras por presión



Prevención eficaz de úlceras por presión

El colchón reactivo CliniCare 100 HF combina las ventajas de los colchones dinámicos y estáticos, y ofrece una prevención eficaz frente a las úlceras por presión para una amplia variedad de entornos hospitalarios.

La capa de espuma alivia mejor la presión en comparación con los colchones estándar, mientras que las celdas de aire optimizan mejor la presión.

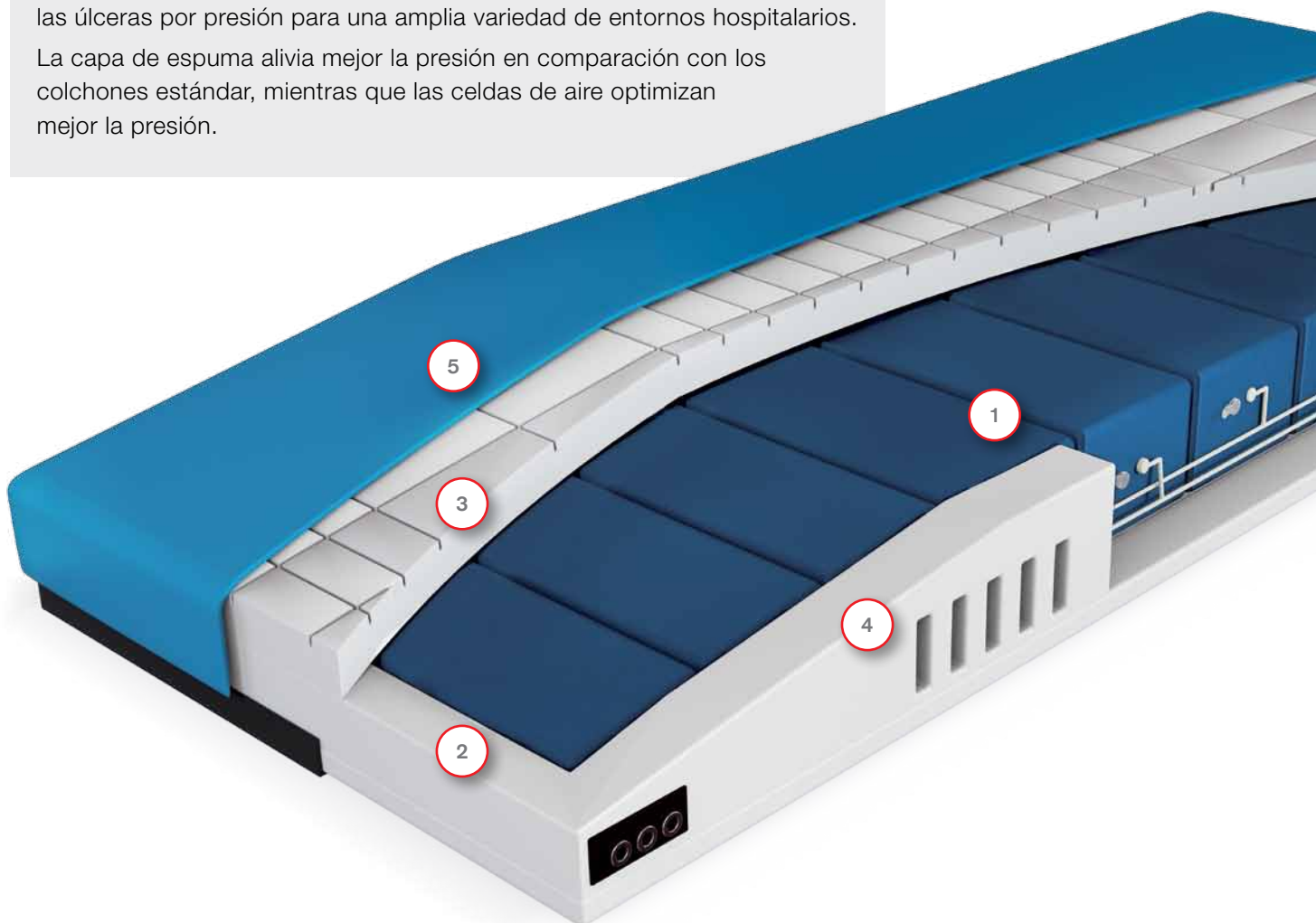

- 1 Las celdas de aire en el interior del colchón están llenas de espuma. El aire se mueve automáticamente entre ellas según la posición del paciente, sin que la unidad esté conectada.
- 2 La sección específica para los pies con siete grados de pendiente minimiza la presión que se ejerce sobre los pies.
- 3 La capa de confort de espuma viscoelástica está perfilada para mejorar la prevención de las úlceras por presión. Ofrece un alto nivel de comodidad al recostarse sobre la cama.

- 4 El borde del colchón crea un soporte estable para las situaciones en que el paciente está recostado o sale de la cama. Los perfiles mejoran la circulación del aire dentro del colchón.
- 5 La funda superior resistente al agua y altamente permeable al vapor y a la humedad ofrece elasticidad en cuatro direcciones y minimiza el rozamiento y las fuerzas de cizallamiento.

COMPRESOR SÍ/NO

El colchón funciona de manera eficaz tanto con un compresor como sin él, según las condiciones y las necesidades del paciente en cuestión.

- Cuando el compresor no está conectado, el aire fluye entre las celdas de acuerdo con los movimientos del paciente gracias a unas válvulas especiales que evitan una rápida pérdida de aire del sistema.
- Si el compresor está conectado, las celdas comienzan a alternar en ciclos de 12 minutos, o puede establecerse el modo de terapia de baja presión constante



Unidad de control del sistema (SCU) de Clinicare HF



Colchón sin SCU



Colchón con SCU

GESTIÓN DEL MICROCLIMA (MCM)

La función MCM contribuye a gestionar el estado general y la condición de la piel del paciente al reducir el riesgo de lesiones causadas por la humedad y permitir que se produzca el proceso natural de termorregulación corporal.

- Con el compresor conectado, se optimiza el nivel de humedad sobre la piel del paciente



Funda superior elástica en cuatro direcciones



Cierre con solapa protectora

MATERIALES FÁCILES DE LIMPIAR

- Cierre en 360° para retirar fácilmente la funda superior.
- Diseño fácil de limpiar, apto para la mayoría de productos de limpieza para colchones hospitalarios.
- La funda superior puede lavarse

Members of LINET Group

LINET Iberia

C/ Bruselas 8 | Európolis | 28232 Las Rozas | Madrid

Tel.: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72 | email: linetiberia@linet.com | www.linet.com

